




Bilag 1 – Uafhængig initialisering




TÆND apparatet
TÆND apparatet ved at
trykke på **HANDLING-**
knappen

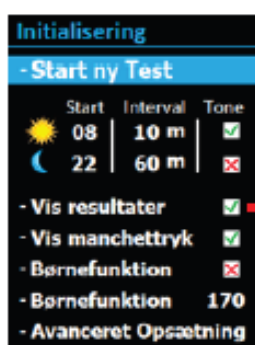


Tryk en gang på
HANDLING-knappen for
at fremhæve måleperiode
og -interval.




Tryk en gang på **HAND-**
LING-knappen for at redi-
gere det fremhævede felt.

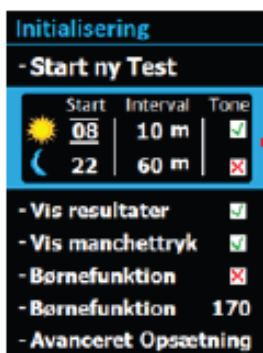

Bemærk de hvide streger
over og under det felt, du
har markeret. Brug **OP-**
og **NED-knapperne** til
at flytte til et andet felt,
der skal redigeres. Tryk
på **HANDLING-knappen**
for at redigere dag og tid
for start.

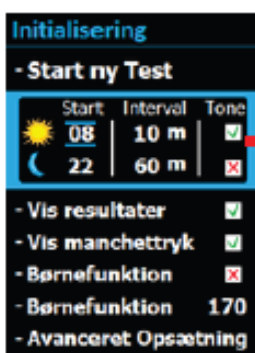

Bemærk at stregerne er
blevet blå for at angive,
at feltet bliver redigeret.
Brug **OP- og NED-**
knapperne til at øge eller
mindske tallet. Tryk på
HANDLING-knappen for
at vælge den ønskede tid.

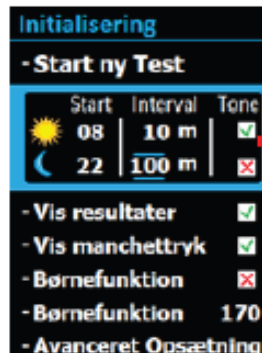

Gentag de foregående
trin, indtil du har indstillet
ønsket tid og intervaller
for start/stop. Tryk et par
gange på **OP-knappen**,
indtil du har markeret
Start ny test, og tryk på
HANDLING-knappen.

