



1.10 Hændelseskoder

Måleren viser en hændelseskode, når en hændelse forhindrer måleren i at fuldende en blodtryksmåling. De to cifre i hændelseskoden angiver årsagen til, at målingen blev afbrudt. Nedenstående skema beskriver hændelseskoder, der vises på måleren, samt de der vises på rapporten over hændelseskoder.

Rapport	Problem
EC03	Patienten annullerede aflæsningen ved at trykke på HANDLING-knappen. Der foretages ikke et nyt forsøg efter koden EC03.
EC04	Blodtryksmålingen blev ikke gennemført inden for den maksimalt tilladte tid. Jævnligt forekommende EC04-meddelelser kan skyldes, at patienten bevæger sig for meget. Hyppige EC04-meddelelser kan være tegn på, at manchetten ikke er sat korrekt på, eller at der er en fejl ved måleren, som skal returneres til Spacelabs til service.
ECn4	(hvor n = 1 til 9) Angiver, at et eller flere af blodtryksresultaterne var korrupte og derefter gendannet. Hyppig forekomst af denne meddelelse er tegn på en fejl, der nødvendiggør, at måleren returneres til Spacelabs til service.
EC10	Artefakt der skyldes for meget bevægelse. Hyppige EC10-meddelelser kan være tegn på luftlækage, og apparatet skal returneres til Spacelabs til service.
EC11	Blev ikke pumpet op over det gennemsnitlige arterielle niveau.
EC16	Lavt batteri registreret inden start på måling.
EC18	For få dataregistreringer til at bestemme blodtrykket nøjagtigt. Denne meddelelse kan være tegn på, at patienten ikke har manchetten på (taget af, men stadig tilsluttet måleren). Meddelelsen kan også være tegn på, at bevægelsesartefakter forårsager størstedelen af de ufuldstændige data.
EC20	A) Et meget stort antal bevægelsesartefakter B) Hjerterytmie
EC21	Pumpede ikke op over det systoliske tryk.
EC22	Overtryk.
EC26	Lavt batteri registreret efter påbegyndt måling. Forårsages sædvanligvis af, at pumpen bruger nok strøm til at sænke batterispændingen.
EC28	Diastolisk tryk over 200 mmHg.
EC32	Overtryk.
EC38	Pulstryk under 16 mmHg.
EC40	A) Bevægelsesartefakt ved systolisk tryk B) Hjerterytmie



Rapport	Problem
EC42	Ingen manchet påsat.
EC45	Ugyldig udtømningsstørrelse. Måleren har automatisk ændret udtømningsstørrelsen til 8 mmHg.
EC48	A) Bevægelsesartefakt ved gennemsnitligt arterielt tryk B) Hjerterytmi
EC50	A) Bevægelsesartefakt ved diastolisk tryk B) Hjerterytmi
EC52	Knæk på slange.
EC55	Et uventet strømsvigt, muligvis forårsaget af: a) Batterierne er taget ud under en blodtryksmåling, b) overtryk i manchetten, eller c) timeout for måleren. Hyppige EC55-meddelelser er tegn på funktionsvigt, så apparatet skal returneres til Spacelabs til service.
EC58	A) Bevægelsesartefakt ved diastolisk tryk B) Hjerterytmi
EC62	Manchetten sidder for løst.
EC70	Det systoliske tryk var over det højeste manchetryk. Dette resultat lader imidlertid til at være en fejl forårsaget af en bevægelsesartefakt. Derfor vil manchetten ikke blive pumpet op til et højere tryk ved næste måling.
EC75	Fejlfunktion ved udstyret. Returner til Spacelabs Healthcare for service.
EC78	Blokeret tilslutningsfilter. Returner til Spacelabs Healthcare for service.
EC80	A) Bevægelsesartefakt B) Hjerterytmi
EC85	Tid og dato er korrupte. Opdater dem for at forsætte med normal betjening.
EC90	A) Bevægelsesartefakt B) Hjerterytmi
EC91	Det systoliske tryk lader til at være højere end den valgte maksimumsgrænse for manchetrykket.
EC95	Baseline-manchetrykket ligger uden for grænserne. Måleren skal korrigere baseline.
EC99	Uventede eller modstridende data (f.eks. et negativt manchetryk).

Ved forekomst af evt. hyppige hændelseskoder, anbefales det at kontakte Corona LifeCare A/S for evt. udredning, reparation eller servicering.

Der henvises endvidere til Corona LifeCare's Alm. salgs og leveringsbetingelser, herunder specielt garanti, samt bortfald af garanti:

"Garanti gælder endvidere ikke udstyr, der er blevet fejlbehæftet som følge af mislighold eller overbelastning, når udstyret har været fejlbetjent/fejlbehandlet, været anvendt uden for de specificerede operationsbetingelser, været opbevaret på anden måde end ved de specificerede opbevaringsbetingelser, været udsat for uautoriseret indgriben / f.eks. adskillelse/forsøg på reparation - eller at udstyret har været fejlemløst under forsendelse."